


Neue Walser® Zahn-Matrizen #10a/8a!

4-flächige Füllungen in der Hälfte der Zeit

Auf der Weltleitmesse in Köln wurde diese Innovation **von Hunderttausenden Produkten zu den Highlights der IDS 2019** gewählt und von Zahnärzten weltweit sofort bestellt.

Die innovative Zahn-Matrize wurde auf Wunsch der Zahnärzte die bereits in über 120 Ländern mit Walser® Matrizen arbeiten, aus der Praxis für die Praxis entwickelt.

Diese Walser® Matrize mit automatischer und verstellbarer Anpassung kann z.B. palatinal je nach Ausweitung der aufzubauenden Zahnform angepasst werden.

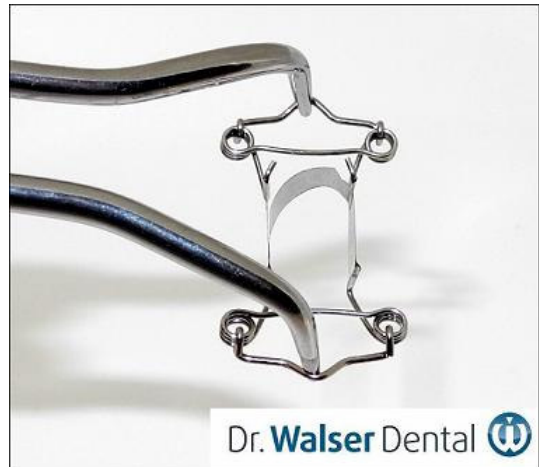

Lesen Sie folgende „Stimme der Begeisterung“ von einer Ihrer Kolleginnen aus Deutschland:

"Ich habe die neuen Walser® Matrizen #10a/8a inzwischen mehrfach mit einer Handbewegung eingesetzt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, das geht super!

Die Applikation ist einfach, der Zeitaufwand für die Rekonstruktion hat sich fast halbiert und die Gestaltung der Kontaktfläche im Approximalbereich ist wie gehabt viel einfacher.

Auch MIH-Patienten können von dieser neuen Matrize profitieren."

Die Applikation ist einfach, der Zeitaufwand für die Rekonstruktion halbiert sich nahezu:

1. Beim Spannen der Matrize mit dem Finger das hochstehende Band gleichzeitig nach unten drücken auf die Höhe des berührenden Bandes.
2. Durch das Aufspannen der Matrize über dem Molaren steuern Sie selbst die parallele Verschiebung der Bänder. Die Matrize können Sie sowohl auf die palatinale als auch die bukkale Seite drehen, das gleiche gilt für den Unterkiefer.
3. Beim Loslassen der Matrize am Zahn schiebt sich das Band automatisch Richtung interdental. Sie können selbst durch ein Instrument (z.B. Kugelstopfer) steuern, wie weit das Band in den Interdentalraum geschoben wird.

Bestellen Sie jederzeit einfach und schnell in unserem Onlineshop unter <https://www.walser-dental.com/de/onlineshop>

Es ist keine Anmeldung erforderlich!



Zehntausende Zahnärzte in über 120 Ländern weltweit arbeiten mit WALSER® Matrizen und täglich werden es mehr...