



## Inlay- und Stiftpinzette **Höchster Schließdruck!!**

nach Dr. Walser

Diese Pinzette erfasst das Inlay nur am äußersten Rand, der entsprechend dem finierten Kavitätenrand stets divergierend vorragt.

Die Pinzettenspitzen haben eine ganz spezifische Querrille, in die der Füllungsrand einrastet. Zusammen mit der Längsrille ergeben sich je 2 winzige Zacken, die sowohl einen konvexen wie konkaven Rand sicher fassen. (Abb. 1)

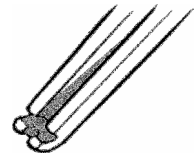


Abb.1

Schon eine geringfügige Divergenz des Füllungsrandes erlaubt ein sicheres Erfassen. Die horizontale Stufe der Querrille verhindert, dass das Inlay bei Druckanwendung in die Pinzette hineinrutscht. (Abb. 2)



Abb.2

### Vorteile:

- Zusätzlich verwendbar zum Erfassen von Wurzelstiften, Papierspitzen, Artikulationspapier, Tupfern etc.
- Sicherer Halt des Inlays, da die Pinzettenspitzen durch ihren starken Schließdruck gegeneinander gepresst werden.
- Auch bei kleinen oder annähernd symmetrischen Inlays ergeben sich keine Zweifel über die Zuordnung im Munde.
- Vom Modell her richtig orientierte Übernahme der Füllung in die Pinzette.
- Die Füllung kann tief in die Kavität versenkt werden, was schon bei der Einprobe vorteilhaft ist.
- Die in der Pinzette fixierte Füllung kann durch Abwischen mit Alkohol, Trockenblasen der Füllung, Bestreichen mit Zement, risikolos von der Helferin übernommen werden.

Bestellen Sie jederzeit einfach und schnell in unserem Onlineshop unter <https://www.walser-dental.com/de/onlineshop>

Es ist keine Anmeldung erforderlich!



**Zehntausende Zahnärzte in über 120 Ländern weltweit arbeiten mit WALSER® Matrizen und täglich werden es mehr...**